

Instructions for Use (제품설명서/첨부분서)

작성연월 : 2024-11

사용목적

골 수술시 절골, 절제, 천자, 천공 등에 사용하는 수동식 수술 기구


사용방법 및 조작방법

가. 사용 전 준비사항

- 비멸균 상태로 제공되는 제품은 사용하기 전에 반드시 적절한 세척 및 멸균 과정을 거쳐야 합니다.
- Stryker 트레이는 의료기기를 멸균, 이동 및 보관하는 데 사용할 수 있습니다. 트레이는 완전히 장착된 상태에서 세척이나 소독할 수 있도록 만들어진 것이 아닙니다. 제대로 세척하려면 트레이에서 제품을 제거하고 세척해야 합니다.

사용 전 처리 지침에 대한 요약

제품을 사용하기 전 수행해야 하는 단계가 아래 흐름도에 요약되어 있습니다. 각 단계에 대한 자세한 지침은 다음 항목을 참조하십시오.

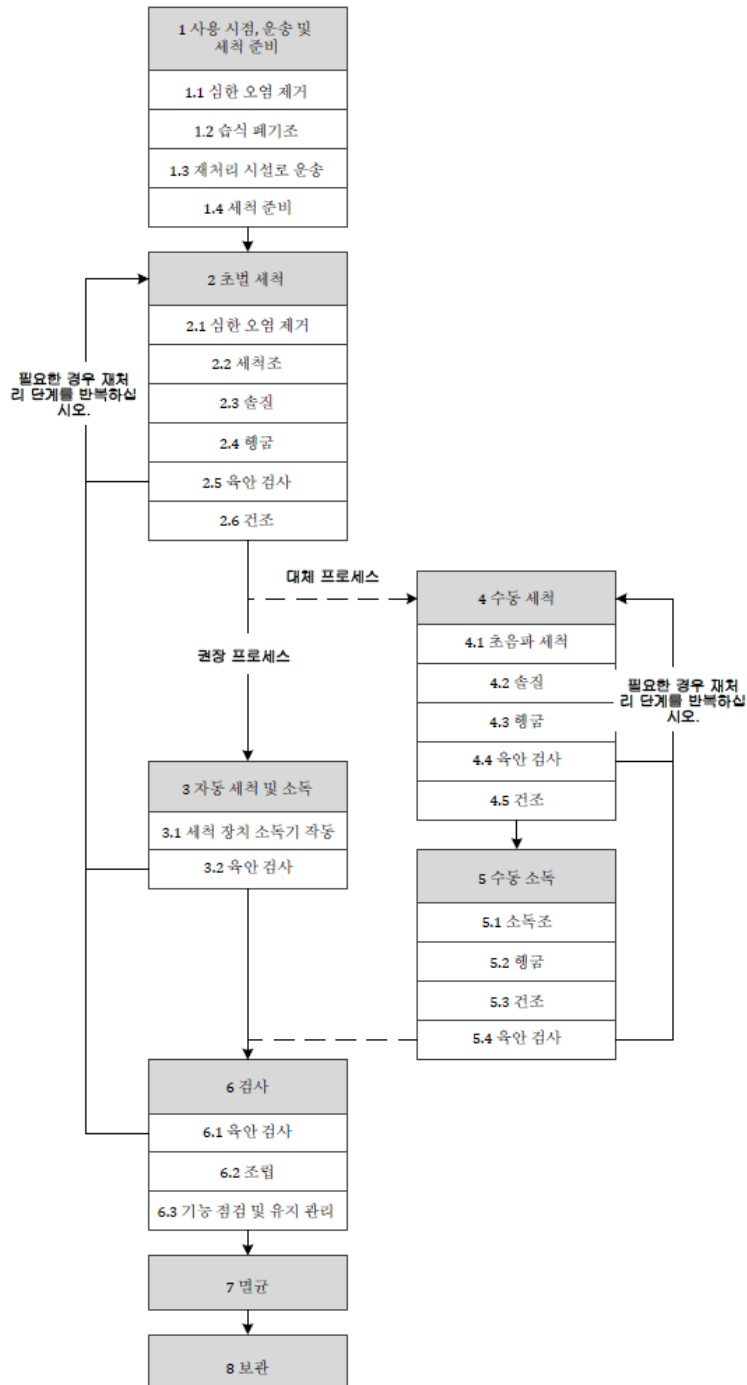

- 본 지침에는 의료기기의 두 가지 세척 방법이 나와 있습니다.
 - ✓ 세척 장치 소독기를 사용하는 자동화된 방법
 - ✓ 수동 방법
- 가능한 경우 항상 자동 세척 방법을 사용해야 합니다. 자동 세척 프로세스는 반복해서 실시할 수 있어 더 확실하며, 의료진이 오염된 장치 및 사용한 세정제에 노출될 위험이 적습니다.
- 어떤 방법을 사용하더라도 직원은 항상 적합한 보호복 및 보호 장비를 사용해야 합니다. 특히 제품의 정확한 취급 및 사용법에 대한 내용은 세정제 제조업체에서 제공한 지침을 준수하십시오.
- 세척액 및 소독제의 권장 농도 및 장치를 담그는 시간에 대해서는 세제 제조업체에서 제공한 지침을 준수하십시오.
- 농도 및 시간이 많이 초과되는 경우 일부 재질이 탈색되거나 부식될 수 있습니다. 또한 세척 및 소독 후 충분히 헹구지 않은 경우에도 탈색 및 부식이 발생할 수 있습니다.
- 의료기기를 세척하거나 소독하는 경우에는 특별히 제조된 세정제 및/또는 소독제만 사용해야 합니다.
- 지역에 따라 사용할 수 있는 세정제 및 소독제가 다를 수 있으므로 적합한 세정제 선택 기준을 확인하여 사용해야 합니다.
- 세정제 및/또는 소독제를 희석하고 의료기기를 헹굴 때 사용하는 물의 수질은 신중하게 고려해야 합니다. 세정제 및/또는 소독제의 희석에는 탈염수가 권장됩니다.
- 행균을 위해 멸균수 또는 무균수 또는 생균 수가 10마리/ml 미만이거나 내독소가 없는 물, 즉 내독소/ml가 0.25 미만인 물만 사용해야 합니다. (예: 정제수 또는 고순도수) 경수의 미네랄 잔류물은 물론 미생물 및 내독소로 인한 심한 오염은 장치의 얼룩을 유발하거나 효과적인 세척 및 오염 제거를 불가능하게 할 수 있습니다.

1) 사용 시점, 운송 및 세척 준비

단계	설명/장비/매개변수	추가정보
1.1 심한 오염 제거	필요 장비: ✓ 보풀이 없는 흡수성 일회용 종이 와이프 ✓ 흐르는 물: 멸균수 또는 무균수(세균 10마리/ml 미만) 또는 내독소 0.25ml 미만의 내독소 무함유수 (예: 정제수 또는 고순도수) ✓ 주사기: 헹구야 하는 제품의 크기에 따라 1~50ml 용량	-
	적용 직후 보풀이 없는 흡수성 일회용 종이 와이프를 사용하여 심한 오염을 제거합니다.	세척 프로세스는 오염물의 건조를 피하기 위해 적용 직후(수술 후 최대 2시간 이내) 시작해야 합니다.
	흐르는 물에 제품을 1분 이상 헹굽니다.	-
	주사기를 이용하여 흡, 힌지 등 세척하기 까다로운 부분은 3번 이상 헹굽니다.	-
1.2 습식 폐기조 (Wet Disposal Bath)	필요 장비: ✓ 소독제 ✓ 탈염수 ✓ 깨지지 않고 소독 가능한 밀폐 용기	소독액은 Stryker 제조원에서 제공한 OT-RG-1 지침서의 요구 사항을 충족해야 합니다.
	세제 제조업체의 사양에 따라 적절한 용기에 탈염수를 사용하여 효과적인 알데히드 무함유 소독액을 준비합니다.	단백질 고정을 피하기 위해 용액의 온도는 40°C 미만이어야 합니다.
	유기물이 건조되지 않도록 제품을 용기에 조심스럽게 준비합니다. 제품의 모든 부분이 소독액에 완전히 담길 수 있도록 합니다.	⚠ 주의 ✓ 날카로운 모서리가 있을 수 있습니다. 부상을 입지 않도록 주의해서 진행하십시오. ✓ 제품의 모양이 변하지 않도록 주의하여 다루십시오.

		<p>기계적 손상을 방지하기 위해, 용기에 무거운 제품과 깨지기 쉬운 제품을 함께 넣지 마십시오.</p> <p>모든 표면에 소독액을 적셔야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 주사기를 사용하여 힌지 등 제품의 모든 부분을 적시십시오. ✓ 제품의 구조물 안에 공기가 들어가지 않도록 하십시오. ✓ 연결 부위나 움직이는 부품이 있는 제품은 3번 이상 완전히 움직이십시오.
1.3 운송	용기에 넣은 제품을 세척할 장소로 조심스럽게 운반합니다.	-
1.4 세척 준비	지시가 있는 경우 제품을 분해합니다.	Stryker 대리점에서 제공하는 수술 기술 설명서 또는 별도의 지침을 참조하십시오.

2) 사전 세척

단계	설명/장비/매개변수	추가정보
2.1 심한 오염 제거	<p>필요 장비:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 세정제 ✓ 탈염수 ✓ 용기 ✓ 주사기 ✓ 보풀이 없는 흡수성 일회용 종이 와이프 	<p>제조원의 요건에 충족하는 수동 세척용 세정제를 사용하십시오.</p> <p>제품을 완전히 담글 수 있는 크기의 용기를 사용하십시오.</p>
	세제 제조업체의 사양에 따라 적절한 용기에 탈염수를 사용하여 효과적인 세척액을 준비합니다.	단백질 고정을 피하기 위해 용액의 온도는 40°C 미만이어야 합니다.
	그래도 오염이 보이는 경우, 세척액에 적신 종이 와이프를 사용하여 심한 오염을 제거합니다.	-
2.2 세척	연결 부위나 움직이는 부품이 있는 제품을 분해합니다. 세척액에 제품을 완전히 담급니다.	<p>이 단계는 하위 단계 4.1의 설명에 따라 초음파 수조 내에서 실시하는 것이 좋습니다. 모든 표면에 소독액을 충분히 적셔야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 주사기를 사용하여 힌지 등 제품의 모든 부분을 적시십시오. ✓ 제품의 구조물 안에 공기가 들어가지 않도록 하십시오. ✓ 연결 부위나 움직이는 부품이 있는 제품은 3번 이상 완전히 움직이십시오.
	세제 제조업체의 지침에 지정된 시간동안 제품을 적십니다.	
2.3 솔질	<p>필요 장비:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 부드럽고 견고한 플라스틱 브러쉬 ✓ 부드럽고 견고한 플라스틱 병 브러쉬 ✓ 단단한 플라스틱 강모 브러쉬 ✓ 플라스틱 청소 전선 ✓ 원뿔형 치간 브러쉬 	<p>⚠ 주의 표면 손상을 방지하기 위해 항상 제품을 조심스럽게 다루십시오. 세척 시 금속 솔 또는 강모를 사용하지 마십시오.</p> <p>해당하는 제품의 크기에 맞는 장비를 사용하십시오.</p>
	육안으로 오염물이 보이지 않을 때까지 제품을 철저히 솔질합니다. 모든 표면을 솔질할 수 있도록 연결 부위나 움직이는 부품이 있는 제품을 열거나 조작합니다.	거친 표면과 솔질이 닿지 않을 수 있는 구조물에 특히 주의하십시오. 특히 힌지 및 연결 부위를 주의하여 세척하십시오.
2.4 헹굼	<p>필요 장비:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 흐르는 물: 멸균수 또는 무균수(세균 10마리/ml 미만) 또는 내독소 0.25ml 미만의 내독소 무함유수 (예: 정제수 또는 고순도수) ✓ 주사기: 헹궈야 하는 제품의 크기에 따라 1~50ml 용량 	-

	세척액의 흔적이 모두 제거될 때까지 제품을 흐르는 물에 최소 1분 동안 행굽니다.	-
	주사기를 사용하여 흡, 힌지 등 세척하기 까다로운 부분을 최소 3회 이상 행굽니다.	-
2.5 육안 검사	오염 물질이 남아있지 않은지 육안으로 확인한 다음 필요한 경우 사전 세척 단계를 다시 수행합니다.	-
2.6 건조	필요 장비: ✓ 보풀이 없는 흡수성 종이 와이프	-
	보풀이 없는 흡수성 종이 와이프로 공기 중에서 제품을 건조하거나 즉시 다음 세척 단계로 넘어갑니다.	-

3) 자동세척 및 소독

단계	설명/장비/매개변수	추가정보
3.1 세척 장치 소독기 작동	필요 장비: ✓ 필요에 따라 행굽 포트가 있는 세척 소독기 ✓ 세정제 ✓ 세척 단계용 탈염수 ✓ 세균 10마리/ml 미만의 새로 제조된 멸균수 또는 무균수 또는 내독소 0.25ml 미만의 내 독소 무함유수 (예: 정제수 또는 최종 행굽/소독용 고순도수)	올바르게 설치 및 승인되고, 정기적으로 유지 관리 및 테스트되며, CE 표시 또는 ISO 15883 시리즈에 따른 승인 등을 통해 기본적인 효과가 입증된 세척 소독기를 사용하십시오. Stryker 제조원에서 제공한 OT-RG-1 지침서에 설명된 기준에 부합하고, 세제 제조업체의 지침에 명시된 농도에 맞는 자동 세척용 세정제를 사용하십시오.
	승인된 열 소독 프로그램(A0 값 > 3000 또는 구형 소독 세척기의 경우 90°C에서 5분 이상 적용)과 충분한 건조 단계 및 활성 건조 프로그램을 위한 여과된 공기를 사용합니다.	⚠ 주의 의료기기에 소독제가 남을 위험이 있으므로 화학 소독 프로그램을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 잔여물의 위험이 있으므로 린스를 사용하지 않는 것이 좋습니다.
	제품을 세척 소독기에 넣습니다.	제품을 서로 닿지 않게 놓으십시오. 세척 중에 제품이 움직여 손상될 수 있으며 포개진 부분이 세척되지 않을 수 있습니다. 연결 제품은 열린 위치에 두어야 합니다.
	세척 소독기의 주기에 따라 작동합니다.	-
3.2 육안 검사	세척이 완료되면 세척 소독기에서 제품을 꺼냅니다. 각 제품에 오염 물질이 남아 있는지, 제대로 건조되었는지 여부를 육안으로 확인합니다. 오염 물질이 남아있는 경우 사전 세척 단계를 포함하여 세척 프로세스를 다시 수행합니다. 남아 있는 물기는 의료용 압축 공기 및 보풀이 없는 흡수성 일회용 종이 와이프로 건조(필요한 경우 깨끗한 장소에서 2시간 이내로 추가 건조)하거나 110°C 미만의 오븐에서 가열하여 제거할 수 있습니다.	의료기기에 화학 잔류물이 남게될 가능성이 있기 때문에 화학 소독 프로그램을 권장하지 않습니다. 이러한 잔류물은 멸균 효능을 저해할 수 있습니다. 알림 세척 프로세스 중 지정된 건조 온도를 준수해야 합니다. 온도가 높으면 의료기기의 기능이 제한될 수 있습니다.

4) 수동 세척

단계	설명/장비/매개변수	추가정보
4.1 초음파 세척	필요 장비: ✓ 장치를 완전히 담글 수 있는 초음파 수조 (주파수 25-50kHz) ✓ 세정제 ✓ 탈염수 ✓ 주사기	Stryker 제조원에서 제공한 OT-RG-1 지침서의 기준에 부합하고 초음파 처리에 적합한 수동 세척용 세정제를 사용해야 합니다.

	<p>초음파 수조에 세척액을 준비합니다. 세제 제조업체의 지침에 명시된 농도 및 온도여야 합니다.</p>	-
	<p>연결 부위나 움직이는 부품이 있는 제품을 엽니다. 수조에 제품을 완전히 담근 후 최소 15분 동안 수조를 작동시킵니다.</p>	<p>초음파 수조를 활성화하기 전에 모든 표면에 소독액을 적셔야 합니다. ✓ 주사기를 사용하여 힌지 등 제품의 모든 부분을 적시십시오. ✓ 제품의 구조물 안에 공기가 들어가지 않도록 하십시오. ✓ 연결 부위나 움직이는 부품이 있는 제품은 3번 이상 완전히 움직이십시오.</p>
4.2 솔질	<p>필요 장비: ✓ 부드럽고 견고한 플라스틱 브러쉬 ✓ 부드럽고 견고한 플라스틱 병 브러쉬 ✓ 단단한 플라스틱 강모 브러쉬 ✓ 플라스틱 청소 전선 ✓ 원뿔형 치간 브러쉬 ✓ 주사기: 행귀야 하는 제품의 크기에 따라 1~50ml 용량</p>	<p>⚠ 주의 표면 손상을 방지하기 위해 항상 제품을 조심스럽게 다루십시오. 세척 시 금속 솔 또는 강모를 사용하지 마십시오.</p> <p>해당하는 제품 크기에 맞는 장비를 사용하십시오.</p>
	<p>더 이상 오염이 보이지 않을 때까지 제품을 철저히 솔질합니다.</p>	<p>거친 표면과 솔질이 닿지 않을 수 있는 구조물에 특히 주의하십시오. 특히 힌지 및 연결 부위를 주의하여 세척하십시오.</p>
4.3 헹굼	<p>필요 장비: ✓ 흐르는 물: 멸균수 또는 무균수(세균 10마리/mL 미만) 또는 내독소 0.25/mL 미만의 내독소 무함유수 (예: 정제수 또는 고순도수) ✓ 주사기: 행귀야 하는 제품의 크기에 따라 1~50ml 용량</p>	-
	<p>남아있는 세척액이 모두 제거될 때까지 제품을 흐르는 물에 최소 1분 동안 헹굽니다.</p>	-
	<p>주사기를 사용하여 홈, 힌지 등 세척하기 까다로운 부분은 최소 3회 이상 헹굽니다.</p>	-
4.4 육안 검사	<p>제품에 남아있는 오염 물질이 있는지 육안으로 검사하고 필요한 경우 수동 세척을 반복합니다.</p>	-
4.5 건조	<p>필요 장비: ✓ 보풀이 없는 흡수성 종이 와이프</p>	-
	<p>보풀이 없는 흡수성 종이 와이프로 공기 중에서 제품을 흡수 건조하거나 즉시 다음 세척 단계로 넘어갑니다.</p>	-

5) 수동 소독

단계	설명/장비/매개변수	추가정보
5.1 소독조	<p>필요 장비: ✓ 소독제 ✓ 탈염수 ✓ 용기 ✓ 주사기: 행귀야 하는 제품의 크기에 따라 1~50ml 용량</p>	<p>Stryker 제조원에서 제공한 OT-RG-1 지침서의 기준에 부합하고 사용할 세정제와 호환되는 수동 소독용 소독제를 사용해야 한다.</p> <p>제품을 완전히 담글 수 있는 크기와 세정제 제조업체의 사용 지침에 명시된 온도로 작동하는 수조를 사용해야 한다.</p>
	<p>세제 제조업체의 지침에 명시된 농도 및 온도에 맞는 소독액이 담긴 수조를 준비합니다.</p>	-

	세제 제조업체의 지침에 명시된 최소 시간 동안 제품을 수조에 완전히 담급니다.	모든 표면에 소독액을 충분히 적셔야 합니다. ✓ 주사기를 사용하여 힌지 등 제품의 모든 부분을 적시십시오. ✓ 제품의 구조물 안에 공기가 들어가지 않도록 하십시오. ✓ 연결 부위나 움직이는 부품이 있는 제품은 3번 이상 완전히 움직이십시오.
5.2 헹굼	필요 장비: ✓ 흐르는 물: 멸균수 또는 무균수(세균 10마리/mL 미만) 또는 내독소 0.25/mL 미만의 내독소 무함유수 (예: 정제수 또는 고순도수) ✓ 주사기: 헹궈야 하는 제품의 크기에 따라 1~50ml 용량	-
	소독액이 모두 제거될 때까지 제품을 흐르는 물에 최소 1분 동안 헹굽니다.	-
	흡, 힌지 등 까다로운 부분은 주사기로 다섯 번 이상 헹굽니다.	-
5.3 건조	필요 장비: ✓ 보풀이 없는 흡수성 종이 와이프 ✓ 오븐	-
	의료용 압축공기와 보풀이 없는 일회용 종이 와이프(필요한 경우 깨끗한 장소에서 최대 2시간 동안 건조)를 사용하거나 110°C 미만의 오븐에서 가열하여 제품을 건조시킵니다.	-
5.4 육안 검사	제품에 남아있는 오염 물질이 있는지 육안으로 검사하고 필요한 경우 전체 수동 세척 및 소독 과정을 다시 수행합니다.	-

6) 검사

단계	설명/장비/매개변수	추가정보
6.1 육안 검사	제품의 모든 부품을 육안으로 검사하여 눈에 띄는 오염 및/또는 부식이 있는지 확인하고 필요한 경우 세척 및 소독을 반복합니다. 외관 상 손상이 전혀 없으며 의료기기 식별 표시(예: 레이저 각인, 인쇄)가 분명히 잘 보이고 읽을 수 있는지 확인하고, 그렇지 않은 경우 새로운 의료기기를 사용합니다.	다음에 특히 주의하십시오. ✓ 연결 부위 및 힌지 등 오염 물질이 "끼는" 부분 ✓ 움푹 들어간 구조물 ✓ 오염 물질이 장치에 들러붙을 수 있는 부분
	알림 필요한 경우 작업 조명과 확대 보조 장치를 사용하는 것이 좋습니다.	
	주의 절단면은 날카롭고 손상된 곳이 있는지 확인해야 합니다.	
6.2 조립	해당되는 경우 제품을 재조립합니다.	Stryker 대리점에서 제공하는 수술 기술 설명서 또는 별도의 정보에 포함된 지침을 참조하십시오.
6.3 기능 점검 및 유지 관리	해당되는 기능 점검 및 예방 유지 관리를 수행합니다. (자세한 정보는 세척, 멸균, 검사 및 유지 관리에 관한 지침의 Stryker 제조원에서 제공한 OT-RG-1 지침서를 참조)	평평한 표면 위에서 제품을 굴러 직진도를 확인할 수 있습니다.
	주의 해당되는 경우 결합 제품이 올바르게 조립되었는지 점검하십시오.	
	알림 필요한 경우 작업 조명과 확대 보조 장치를 사용하는 것이 좋습니다.	

	<p>알림 움직이는 부품이 있는 제품의 기능을 점검하십시오. 필요에 따라 의료용 윤활유(증기 멸균에 적합. 예: Dr. Weigert neodisher IP 스프레이)를 바르십시오.</p> <p>회전 제품의 직진도를 점검하십시오(예: 다회용 드릴 비트).</p>	
--	---	--

7) 수명 종료 정의

알림

- 이 제품의 유효 수명은 사용 방법과 각각의 사용 시간 및 사용 간격 등 여러가지 요인에 따라 달라집니다. 제품을 사용하기 전에 꼼꼼히 검사하고 기능 테스트를 수행하는 것이 의료기기의 사용 수명을 판단하는 가장 좋은 방법입니다. 자세한 내용은 Stryker 제조원에서 제공한 OT-RG-1 지침서를 참조하십시오.
- 재사용 가능한 제품의 수명이 다하여 교체해야 하는 경우, Stryker 담당자에게 문의하십시오.

주의

해당하는 경우, 제품이 손상되어 제대로 기능하지 않거나 또는 조직이나 수술용 장갑을 손상시킬 수 있는 부분이 생겼는지 확인해야 합니다.

8) 포장

가능하다면 세척, 소독 및 확인된 의료기기는 제공된 전용 트레이에 놓아야 합니다. Stryker에서는 아래 나열된 멸균 포장을 검증했습니다. 다른 포장재를 사용할 수도 있지만 해당 의료시설에 검증해야 합니다.

[이중포장]

- Stryker 트레이는 이중포장이 필요합니다. Stryker는 ANSI/AAMI ST79를 준수하고, 승인된 멸균 랩(예: Sterisheet 100+, 녹색, 66g/m²의) 사용을 권장합니다.

소독 및 멸균이 완료된 의료기기의 포장은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- EN ISO 11607
- 증기 멸균 적합성
- 기계적 손상을 방지하기 위해 제품 및 멸균 포장의 충분한 보호
- 제품 및 임플란트 트레이의 무게에 적합한 등급

알림

- 멸균 용기 또는 멸균 포장 안에 트레이를 쌓아 두거나 멸균 중 오토클레이브 안에 쌓아 두면 안 됩니다. 통풍 및 멸균에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
- 단일 제품은 이중 포장된 체 바구니 또는 필 파우치에 포장되어 있을 수 있습니다.
- 크기가 큰 중합체 부품이 있는 트레이의 경우, Stryker는 건조 시간을 45분으로 연장할 것을 권장합니다.
- 분리형 서랍식 트레이는 적재 및 포장 구성으로 인해 수정된 건조 프로세스가 필요할 수 있습니다. Stryker는 건조 시간을 45분으로 연장하거나 분리형 서랍식 트레이를 두 부분으로 분리하여 큰 용기 안에 나란히 넣어 둘 것을 권장합니다.

9) 멸균

알림

열에 불안정한 물질을 포함한 의료기기는 오토클레이브의 추가 부하에 노출되어서는 안 됩니다.

- 증기 멸균(습열) 방법을 권장합니다. 각각의 오토클레이브 주기는 의료기기를 멸균 처리하는 데 적합한 방법으로 Stryker에서 검증했지만, 오토클레이브의 설계 및 성능에 따라 소독 프로세스의 효과가 달라질 수 있습니다.
- 의료 시설에서는 제조업체의 지침에 따라 멸균 장비를 검증해야 하며, Stryker가 제시한 기준과 해당 의료 시설의 장비 및 프로세스와 함께 사용했을 때 멸균 상태를 달성할 수 있음을 확인해야 합니다.

[멸균 방법]

- 사전 진공식(강제 공기 제거) 방법을 사용한 고압증기(습열) 소독 주기를 권장합니다. 오토클레이브는 EN ISO 17665의 요구 사항을 준수해야 하며, 이에 따라 검증, 유지 관리 및 점검해야 합니다.
- Stryker는 전체 의료기기의 케이스/트레이 소독에 대한 오토클레이브 주기를 검증했습니다. 제품은 트레이에 보관된 장착 상태로 멸균해야 합니다. 예를 들어 트레이의 선반 또는 오목한 부분은 조립된 상태의 다중 부품 제품을 놓을 수 있도록 설계되었으며, 멸균을 위해 분해할 필요가 없습니다. 다음 표의 매개변수는 Stryker에서 검증 및 권장하는 멸균 변수입니다.
- 의료 시설의 장비 및 프로세스와 Stryker에서 제공한 기준을 사용해 멸균 상태를 확인할 최종 책임은 해당 의료 시설에 있습니다. 공정을 최적화하려면 여러 소독실, 포장 방법 및/또는 다양한 적재 배치에 대해 모든 주기와 방법을 검증해야 합니다.

방법	EN ISO 17665에 따른 습열 멸균법
주기	부분적인 강제 공기 제거와 함께 포화 상태 증기
노출 시간	4분 ~ 18분
온도	132°C ~ 137°C (270°F ~ 277°F)
건조 시간	권장: 실내에서 최소 30분

* Stryker의 일부 제품에는 이러한 변수가 적용되지 않을 수 있습니다. 이러한 예외에는 다른 검증된 소독 주기를 적용할 수 있습니다. 이러한 사항은 사용 설명서에 설명되어 있으며 바인딩 문자로 표기되어 있습니다. 제품이 제품 설명서 없이 제공되었거나 특정 제품에 사용 가능한 멸균 변수에 문의 사항이 있는 경우 Stryker 담당자에게 문의하십시오.



- **Stryker에서 검증하지 않은 경우, 증기 멸균을 위해 단단한 용기를 사용하지 마십시오. 다른 구성 성분은 증기 침투를 제한하고 의료기기의 효과적인 멸균 및 건조를 방해할 수 있습니다.**

10) 사용 전 보관

- 멸균이 끝나면 의료기기를 물기 및 먼지가 없는 곳에 멸균 포장 상태로 보관하십시오. 보관수명은 사용된 멸균 포장재, 보관방식, 환경 및 취급 조건에 따라 달라집니다. 멸균된 의료기기의 사용 전 최대 보관 수명은 각 의료시설에서 정의해야 합니다.



- 멸균 후 재사용이 가능한 의료기기 및 사용 전 멸균이 필요한 일회용 의료기기의 경우 Stryker 제조원에서 제공한 "세척, 소독, 검사 및 유지 관리 사용설명서 Doc No. OT-RG-1을 참조하십시오.
- **수술 방법 책자 및 세척 지침은 www.ifu.stryker.com에서 온라인으로 요청할 수 있습니다.**

나. 조작방법

- 사용하기 전에 의사는 수술 순서와 제품을 완전하게 이해하여야 합니다.
- 시술할 대상을 정한 후 용도와 기능에 맞는 기구를 선택합니다.
- 선택한 시술기구등을 조합하여 각각의 용도에 맞게 시술합니다.

다. 사용 후 보관 및 관리 방법

- 결함이 있거나 잘못 사용되었던 제품은 즉시 폐기처분합니다.
- 외관상 변형이 생기지 않도록 주의하여 보관합니다.

사용 시 주의사항

- 본 품은 의료용품이므로 전문의료인 외에는 사용할 수 없으며, 사용목적 이외의 사용을 금합니다.
- 시술용도와 시술부위에 적합한 규격의 제품을 선택합니다.
- 사용하기 전에 반드시 멸균소독을 하거나 확인한 후 사용합니다.

부작용 관련 보고 문의처

한국의료기기안전정보원 (080-080-4183)